

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu Zatoxin® Rinse, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

Instrukcja używania zawiera informacje dotyczące użytkowania wyrobów z linii Zatoxin® Rinse

RINSE ZATO)(IN®

Instrukcja używania Zestaw do płukania nosa i zatok Zatoxin® Rinse – Wyrób medyczny

CO TO JEST ZATOXIN® RINSE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Zatoxin® Rinse to wyrób medyczny służący do oczyszczania, przepłukiwania i udrażniania nosa oraz zatok przynosowych.

Produkt dostępny jest w postaci 2 zestawów:

1. Zatoxin® Rinse – zestaw podstawowy: butelka do irygacji o max. poj. 300 ml + 12 saszetek z proszkiem do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok.

2. Zatoxin® Rinse – zestaw uzupełniający: 30 saszetek z proszkiem do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok.

Zatoxin® Rinse to roztwór chlorku sodu i dwuwęglanu sodu, który pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcje. Dwuwęglan sodu zapewnia odpowiednie, lekko zasadowe pH roztworu. Składnik ten rozrzedza gęstą wydzielinę i sprzyja szybszemu usuwaniu zanieczyszczeń z jamy nosowej.

Wyrób nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową nosa i zatok. Zastosowanie hipertonicznego roztworu dodatkowo zmniejsza obrzęk błony śluzowej i uczucie ucisku w zatokach, ułatwiając oddychanie i usuwanie wydzieliny na zewnątrz.

Zatoxin® Rinse jest wyrobem medycznym, który skutecznie można stosować w celu łagodzenia objawów chorób nosa i zatok, takich jak: uczucie zatkanego nosa, zaleganie wydzieliny w jamach nosa i zatok, ucisk w okolicy nosa i zatok, suchość błony śluzowej nosa.

Unikalna konstrukcja butelki do irygacji umożliwiła płukanie nosa i zatok w łatwy i kontrolowany sposób:

- bez użycia dodatkowej siły (bez konieczności ścisnięcia butelki),
- dostosowanie typu płukania (irygacji) do wieku pacjenta oraz poziomu uciążliwości objawów.

Wskazania:

Zestaw do płukania nosa i zatok zaleca się stosować:

- w zapaleniu zatok przynosowych,
- w niezycie nosa różnego pochodzenia,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Zestaw jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nie wpływa negatywnie na prowadzenie pojazdów i urządzeń mechanicznych.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODANIA WYROBU

Wyrób medyczny **Zatoxin® Rinse** należy stosować zgodnie z instrukcją używania.

Dorośli i dzieci powyżej 4. roku życia. Dzieci mogą stosować zestaw jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w niezycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok:

Dawkowanie: rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do irygacji.

W razie potrzeby, w przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa:

Dawkowanie: rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji.

Do przeprowadzenia płukania u osoby dorosłej należy użyć 120 ml roztworu na każdy otwór nosowy. W przypadku przeprowadzania płukania u dzieci należy użyć 60 ml roztworu na każdy otwór nosowy. Pozostałą część niewykorzystanego roztworu należy wylać.

Częstotliwość stosowania zestawu: płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

Ostrzeżenia: nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temperaturze poniżej 19°C) przez godzinę po płukaniu nosa i zatok. Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed snem.

Po przeprowadzeniu płukania, zwłaszcza roztworem hipertonicznym w obrębie jamy nosowej może wystąpić delikatne uczucie pieczenia.

Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu, a także, gdy którykolwiek z elementów zestawu uległ uszkodzeniu.

Do płukania należy stosować tylko butelkę i saszetki załączone do zestawu.

W celu zachowania higieny i uniknięcia przeniesienia infekcji zaleca się stosowanie jednej butelki przez jedną osobę.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Otwórz torebkę zabezpieczającą i wyjmij wszystkie elementy butelki-irygatora.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z butelki-irygatora po raz pierwszy przepłukaj jego elementy pod bieżącą wodą.
3. Wsyp zawartość 1 saszetki do butelki w celu przygotowania roztworu izotonicznego lub 2 saszetki w celu przygotowania roztworu hipertonicznego (rys. 1).
4. Napełnij butelkę przegotowaną wodą (o temperaturze ciała ok. 36,6°C) do poziomu oznaczonego linią 240 ml (rys. 2).
5. Dokładnie zakręć butelkę używając białej nakrętki i mieszaj roztwór przez potrząśnięcie butelką (zatkał palcem otwór dyszy) do całkowitego rozpuszczenia proszku w wodzie (rys. 3).
6. Wybierz odpowiednią końcówkę dostosowaną do wieku użytkownika i typu irygacji jaką chcesz przeprowadzić (rys. 7 – końcówka klasyczna – dla dorosłych, rys. 8 – końcówka do łagodnej irygacji i dla dzieci).
7. Stań w pozycji lekko nachylonej nad umywalką, odwróć irygator do góry dnem i przyłóż końcówkę irygatora do otworu nosowego tak, aby uszczelnić otwór nosa. Pamiętaj, aby oddychać przez usta podczas płukania (rys. 4).
8. Naciskaj palcem biały zawór na spodzie butelki (rys. 5), aby umożliwić jednostajny przepływ roztworu do płukania (120 ml na jeden otwór nosowy – dorośli; 60 ml na jeden otwór nosowy – dzieci), jednocześnie reguluj przepływ roztworu delikatnymi ruchami głowy w bok, aby roztwór który dostał się do nosa wypłynął drugim otworem nosowym.
9. Powyższą czynność (punkt 7) należy powtórzyć dla drugiego otworu nosowego.
10. Nie połykaj roztworu.
11. Po zakończeniu płukania oczyść nos przez wydychanie (rys. 6).
12. Każdorazowo po zakończeniu płukania należy zdemontować butelkę do irygacji i dokładnie umyć wszystkie jej elementy – wypłukać czystą, gorącą wodą (do temperatury 100°C, nie wygotowyj elementów!). Następnie wszystkie elementy trzeba przetrzeć ręcznikiem papierowym, czystą ściereczką lub wysuszyć na powietrzu. Przechowywać w temp. pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.



Więcej informacji na temat produktu i sposobu użycia na stronie: www.zatoxin.pl

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość (alergia) na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego.

Całkowita blokada nosa uniemożliwiająca wydostanie się roztworu.

Nie stosować u osób, w których występuje poważne krwawienie z nosa.

Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, zwłaszcza mokrych, nie zagojonych ran po zabiegach chirurgicznych.

Nie stosować w infekcjach ucha spowodowanych przez np. zapalenie ucha, lub zatkanie ucha spowodowane przez zalegającą woskowinę.

Nie stosować u osób z zaburzeniami równowagi.

W przypadku przebytej operacji ucha, przed użyciem należy skontaktować się z lekarzem.

JAK PRZECHOWYWAĆ ZATOXIN® RINSE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


SKŁAD SASZETKI

Chlorek sodu, dwuwęglan sodu (zawartość netto saszetki: 3,2 g).

OPIS OPAKOWANIA

Zatoxin® Rinse – zestaw podstawowy, zawiera pudełko kartonowe, w którym znajdują się:

- zapakowane w torebkę zabezpieczającą: irygator z podziałką (max. poj. 300 ml) oraz zaworem do regulacji przepływu roztworu do irygacji, 1 nakrętka przykręcana na butelkę, 1 końcówka do klasycznej irygacji (rys. 7), 1 końcówka do łagodnej irygacji (dla dzieci) (rys. 8).

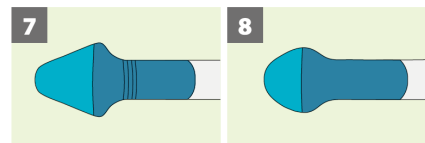

- 12 saszetek w kartoniku (zawartość netto: 38,4 g) z proszkiem do sporządzenia roztworu do płukania nosa i zatok, instrukcję używania.

Zatoxin® Rinse – zestaw uzupełniający, zawiera:

- 30 saszetek w kartoniku (zawartość netto: 96,0 g) z proszkiem do sporządzenia roztworu do płukania nosa i zatok, instrukcję używania.

Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

- Dane wytwórcy.
- Data ważności.
- Numer serii.
- Zazrzyj do instrukcji używania.
- Ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania wyrobu.
- Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Data opracowania instrukcji używania: styczeń 2017.

